


Удобный интерфейс

Быстрый запуск

Запуск последнего цикла всего за 2 нажатия.

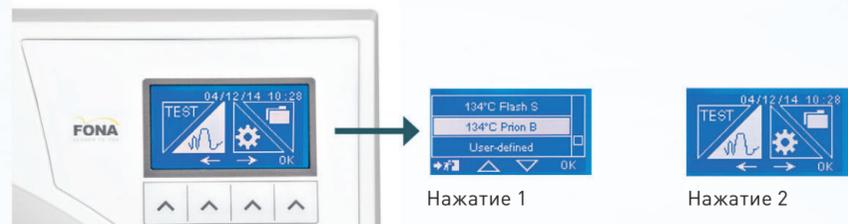

Нажатие 1

Нажатие 2

Простое управление отчетом



Внутренняя память на 500 отчетов о циклах



Экспорт отчетов в формате PDF через встроенный USB-порт



Печать операций/отчетов напрямую (опция)

2 тестовые программы

Тест вакуума, тест Бови-Дика.

Легко понять

Меню на 21 языке.

Легкое использование

Электронное управление открытием и закрытием дверцы.

6 программ стерилизации

Включая программы PRION и CUSTOM (5 фиксированных циклов и 1 пользовательский цикл).

Безопасно и быстро

Один замок, двойная блокировка, тройная безопасность

Безопасный механизм закрытия дверцы.

Режим ожидания

Стерилизатор всегда готов к работе.

Система быстрой генерации пара

Максимальная эффективность, более быстрый цикл.



Надежные современные технологии

Инновационный парогенератор


Надежный и устойчивый к образованию известкового налета.

Прямой нагрев камеры

Надежное решение.

Полное микропроцессорное управление

Надежный процесс стерилизации.

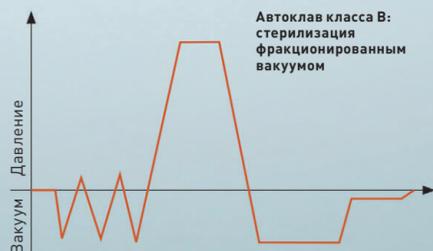

Автоклав класса В: стерилизация фракционированным вакуумом

FONA – это все, что вам нужно для работы

FONA – международный бренд стоматологического оборудования, имеющий производственные мощности на трех континентах, со штаб-квартирой, расположенной в самом сердце Европы. Работая на стоматологическом рынке с 2004 г., мы гарантируем, что наша продукция отвечает самым высоким стандартам качества, всегда надежна и проста в использовании. Наша цель – не только сделать передовые стоматологические технологии доступными на любом рынке, но и помочь стоматологам обеспечить профессиональное обслуживание своих пациентов. Наш ассортимент, имея прекрасное соотношение цены и качества, включает в себя аппараты для томографии, стоматологические установки, лазерные аппараты, инструменты для проведения лечения и гигиенических процедур, а также программное обеспечение. Мы – опытная в продажах и обслуживании команда, преданная своей работе. Мы ВСЕГДА РЯДОМ.

Полный портфель надежных стоматологических технологий



Стоматологические установки

3D- и панорамная рентгеновская съемка

Интраоральная рентгеновская съемка

Сканер фосфорных пластин

Программное обеспечение

Инструментарий

Лазер

Гигиена

Находимся в Европе – доступны во всем мире



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

- Братислава, Словацкая республика

ПРОИЗВОДСТВО

- Бенсхайм, Германия
- Ассаго, Италия
- Гуанчжоу, Китай
- Рисков, Дания
- Нью-Йорк, США

Авторское право принадлежит FONa Dental, s.r.o. Все права сохранены. Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные и исправления. BR0011, v3, RU, 20150217



Центральный офис:
FONA Dental s.r.o.
Шевченкова 34
SK – 85101 Братислава,
Словацкая Республика
info@fonadental.com
www.fonadental.ru

Дилер:



ВЫСОКОКЛАССНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ – ПРОСТО ГЕНИЙ!
HYGENIUS



FONA Hygenius

ВЫСОКОКЛАССНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ – ПРОСТО ГЕНИЙ

Hygenius – стерилизатор класса В, обеспечивающий надежную стерилизацию и высочайший уровень безопасности. Защитите себя, сотрудников и пациентов, используя это устройство, необходимое в каждой клинике.

НАДЕЖНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Быстрый парогенератор, устойчивый к возникновению известкового налета, и прочный нагреватель гарантируют надежную производительность.

БЕЗОПАСНО И БЫСТРО

Разработан для удовлетворения самых высоких стандартов клинической безопасности. Быстрый нагрев, генерация пара и активное охлаждение обеспечивают более короткий и безопасный цикл работы.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для запуска стерилизации достаточно одного нажатия на экран, интуитивно понятное меню на 21 языке.



Циклы стерилизации



ОПИСАНИЕ ЦИКЛА	Тип цикла	Время обработки, мин.	Hygenius 17	Hygenius 22
			Общее мин. время цикла, включая сушку	
134 °C UNIVERSAL	B	4	37	40
121 °C UNIVERSAL	B	20	52	55
134 °C PRION	B	20	53	57
134 °C HOLLOW	S	4	29	32
134 °C FLASH	S	4	25	27
XXX °C (пользовательский)	Температура 121/134 °C Время обработки от 4 мин. [134 °C] или от 20 мин. [121 °C], выбор типа сушки			
Тест вакуума	Тест	Тест	27	25
ГЕЛИКС-ТЕСТ / ТЕСТ БОВИ-ДИКА	Тест	Тест	29	31

- Два доступных объема камеры – 17 или 22 л.
- Более короткие циклы работы для более быстрого рабочего процесса.
- Безопасный и эффективный механизм закрытия дверцы.
- Различные возможности наполнения бака дистиллированной водой.
- Быстрая и простая установка устройства.
- Простое и экономичное техническое обслуживание.

Функциональные возможности



Держатель лотков
Для лотков и кассет, в поставку входит 4 проволочных лотка



Отвод воды
Быстрое подсоединение шланга спереди и сзади.



USB-порт
Для управления отчетами и обновления ПО.

Вы можете выбрать то, что вам необходимо: ручное наполнение водой сверху, опциональное автоматическое наполнение из внешнего резервуара или подключение к сети с дистиллированной водой.



HYGENIUS 17 или 22 для небольшой или крупной клиники!

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Hygenius 17	Hygenius 22
Характеристики электропитания	120/60 Гц, 220–240 В / 50 Гц, 220–230 В / 60 Гц, 2300 Вт, 10 А	
Внешние размеры (В × Ш × Г), мм	420 × 480 × 560	420 × 480 × 660
Общая масса, кг	55	60
Размеры камеры (Ø × глубина), мм	250 × 350 [17 л]	250 × 450 [22 л]
Загрузка, кг	6,0 (цельные неупакованные инструменты) 3,0 (цельные упакованные инструменты)	7,5 (цельные неупакованные инструменты) 4,0 (цельные упакованные инструменты)